

EXACTECH | SHOULDER

クイックガイド




equinox[®]

スモールリバーズ オーギュメントシステム

手術手技の概要

SRエクステンディッド

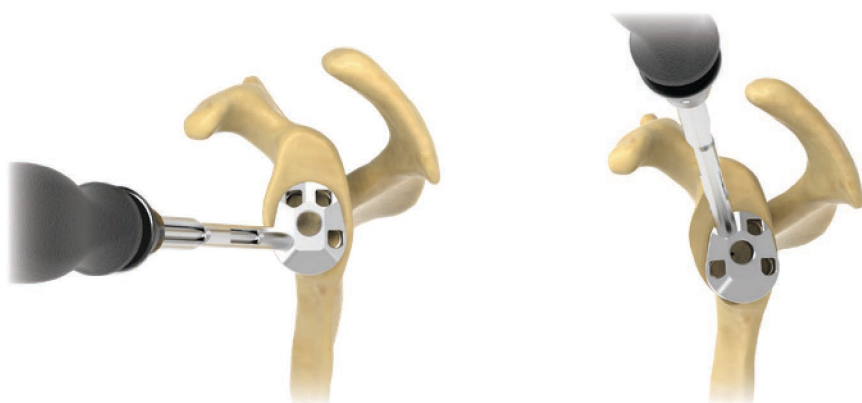

A1. デルトペクトラルアプローチ

A2. スーペロラテラルアプローチ

図 A

SRドリルガイドプレートを肩甲骨下面に合わせる



図 B

Kワイヤーアライメントガイド越しにパイロットチップホールの作成

図 C

グレンオイドリーミング



図 D

エクステンディッドケージドリルを用いてペグドリリング



図 A1

SRドリルガイド(ポステリア)を肩甲骨下面に合わせる



図 B1

Kワイヤーアライメントガイド越しに0°にKワイヤーを挿入



図 C1

0°Kワイヤーを基準にし8°Kワイヤーを挿入



図 D1

8°Kワイヤー越しにグレンノイドリーミング

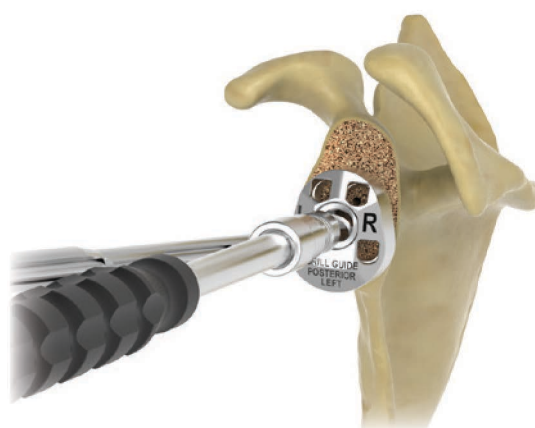


図 E1

ポステリア用ドリルガイドを用いてペグドリリング

手術手技の概要

SRスーパーリアオーギュメント



図 A2

SRドリルガイド(スーパーリア)を肩甲骨下面に合わせる



図 B2

Kワイヤーアライメントガイド越しに0°にKワイヤーを挿入



図 C2

0°Kワイヤーを基準にし10°Kワイヤーを挿入



図 D2

10°Kワイヤー越しにグレンノイドリーミング



図 E2

スーパーリア用ドリルガイドを用いてペグドリリング



図 A3

SRドリルガイド(スーパーロポステリア)を肩甲骨下面に合わせる



図 B3

Kワイヤーアライメントガイド越しに0°にKワイヤーを挿入



図 C3

0°Kワイヤーを基準にし13°Kワイヤーを挿入



図 D3

13°Kワイヤー越しにグレンオイドリーミング

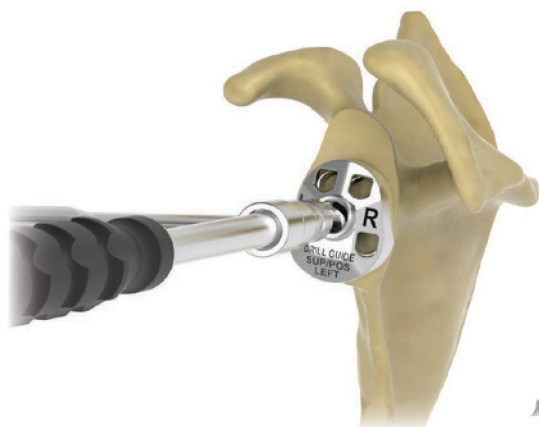



図 E3

エクステンディッドケーージドリルを用いてペグドリリング




システムの仕様


SRスタンダードグレンノイド

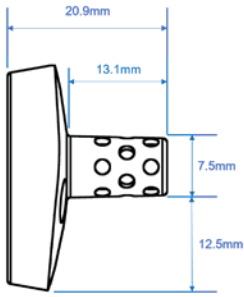


SRエクステンディッドグレンノイド

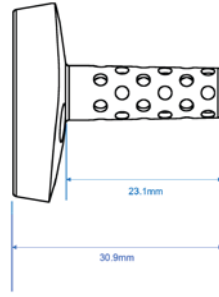



SRポステリアオーギュメント

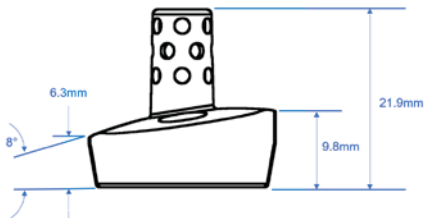


SRスーパーリアオーギュメント

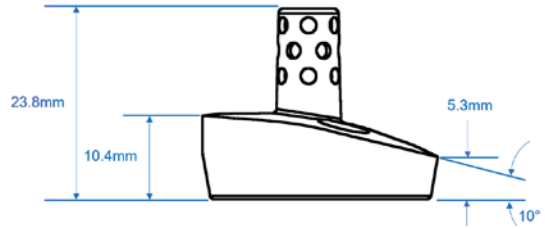

SRスーパーロポステリアオーギュメント

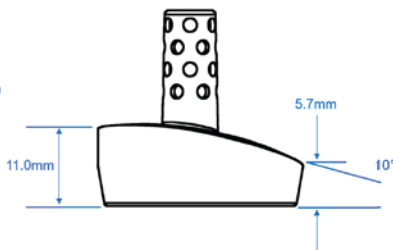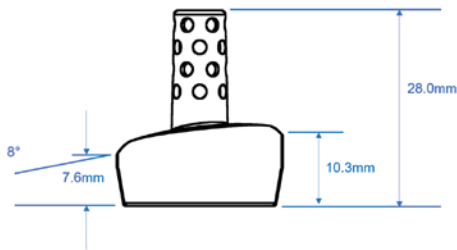

SRグレンスフィア

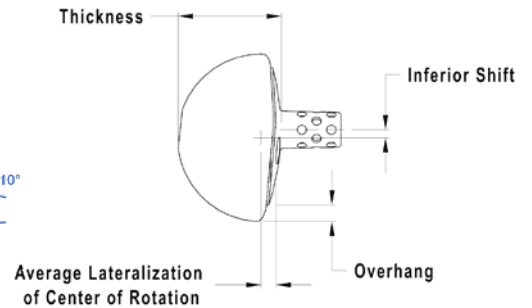

Small Reverse Glenosphere / Glenoid Baseplate

カタログNo.	名称	直径 (mm)	グレンスフィアの厚み (mm)	グレンスフィアの下方向オーバーハング	CORの外方化 (mm)	スタンダード対スーパーリアオーギュメントの外方化距離の差	スタンダード対ポステリアオーギュメントの外方化距離の差	スタンダード対スーパーロポステリアオーギュメントの外方化距離の差
320-31-36	SRグレンスフィア36mm	36mm	22.3mm	3.5mm	2.8mm	+3.5mm	+2.5mm	+4.0mm
320-31-40	SRグレンスフィア40mm	40mm	24.3mm	5.0mm	2.8mm	+3.5mm	+2.5mm	+4.0mm
320-32-36	SRエクспанデッドグレンスフィア36mm	36mm	26.1mm	3.0mm	6.6mm	+3.5mm	+2.5mm	+4.0mm
320-32-40	SRエクспанデッドグレンスフィア40mm	40mm	28.1mm	5.0mm	6.6mm	+3.5mm	+2.5mm	+4.0mm

インプラント一覧

カタログ番号

部品説明

320-35-01

SRグレノイドプレート



320-35-02

SRスーパーリアオーギュメント グレノイドプレート(10°)



320-35-03

SRポステリアオーギュメント グレノイドプレート(8°)左



320-35-04

SRポステリアオーギュメント グレノイドプレート(8°)右



320-35-06

SRグレノイドプレート エクステンディド



320-35-07

SRスーパーロポステリア グレノイドプレート左



320-35-08

SRスーパーロポステリア グレノイドプレート右



販売名	エキノックスショルダーシステム	承認番号	22900BZX00105000
販売名	エキノックススモールリバーズ	承認番号	30200BZX00326000
販売名	人工肩関節用手術器械	届出番号	13B1X10054S00001

工具一覧

カタログ番号

部品説明

スモールリバーズ オーギュメントKIT

321-35-02 SRドリルガイド スーペリア



321-35-03 SRドリルガイド ポステリア 左
321-35-04 SRドリルガイド ポステリア 右



321-35-07 SRドリルガイド スーペロポステリア 左
321-35-08 SRドリルガイド スーペロポステリア 右



スモールリバーズ スタンダードKIT

321-35-10 Kワイヤーアライメントガイド



321-35-20 SRドリルガイドプレート



315-52-10 グレノイドガイドハンドル



321-35-23 SRベースプレートインサーター



エキノックス スタンダードKIT

321-17-20 スーペリアオーギュメントKワイヤーアライメントガイド 左
321-17-21 スーペリアオーギュメントKワイヤーアライメントガイド 右



321-17-22 ポステリアオーギュメントKワイヤーアライメントガイド 左
321-17-23 ポステリアオーギュメントKワイヤーアライメントガイド 右



321-17-24 スーペロポステリアオーギュメントKワイヤーアライメントガイド 左
321-17-25 スーペロポステリアオーギュメントKワイヤーアライメントガイド 右



321-15-38 エクステンディド ケージドリル



315-35-00 Kワイヤー2mm

Exactech is proud to have offices and distributors around the globe.
For more information about Exactech products available in your country, please visit www.exac.com

Exactech[®]
Surgeon focused. Patient driven.[™]

製造販売元
イグザクテック株式会社
〒103-0027
東京都中央区日本橋3-15-2 鹿児島ビル8F
Tel: 03-6262-0880 Fax: 03-6262-0820

12-0001764

2101-1